


# FibroCold Ag

# NEOFIX®

ПОВЯЗКА РАНЕВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ГИДРОКОЛЛОИДНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ  
АДГЕЗИВНАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

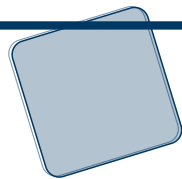

ГИДРОКОЛЛОИДНАЯ  
АТРАВМАТИЧНАЯ






ОЧИЩЕНИЕ  
БОРЬБА С ИНФЕКЦИЕЙ  
БАЛАНС ВЛАЖНОСТИ  
ЗАЖИВЛЕНИЕ



СТЕПЕНЬ  
ЭКССУДАЦИИ



АНТИМИКРОБНАЯ

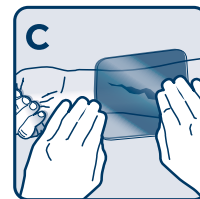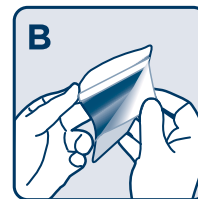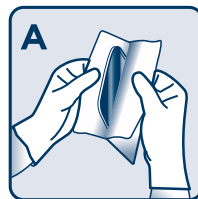

**Описание:** NEOFIX® FibroCold Ag – гидроколлоидная клейкая раневая повязка с ионами серебра, снаружи покрытая антибактериальной водонепроницаемой полиуретановой пленкой.

Для наружного применения.  
Стерильность гарантирована при целостности упаковки.  
Для одноразового применения.

**Состав:** гидроколлоидные частицы (карбоксиметилцеллюлоза), ионы серебра, изопреновый каучук.

**Показания:** Повязка NEOFIX® FibroCold Ag предназначена для местного лечения поверхностных и частично глубоких ран со слабым и умеренным уровнем экссудации, в том числе инфицированных ран и ран с риском развития вторичной инфекции, таких как пролежни, венозные трофические язвы, диабетические язвы стопы, ожоги I и II степени, донорские участки при пересадке кожи, раны в области стом, хирургические раны.

**Свойства:** NEOFIX® FibroCold Ag обеспечивает оптимальные условия для заживления ран во влажной среде, оптимальный дренаж экссудата и его удержание, предотвращает риск развития мацерации раны и окружающих кожных покровов, создает эффект амортизации, что обеспечивает дополнительную защиту раны от внешнего механического воздействия. Благодаря наличию ионов серебра по всей толщине гидроколлоидного матрикса повязка NEOFIX® FibroCold Ag оказывает антимикробное действие, подавляет патогенные микроорганизмы, предотвращая развитие раневой инфекции. Серебро обладает широким спектром антимикробного действия на грамотрицательные, грамположительные бактерии, вирусы и грибы. Наружная полиуретановая пленка защищает рану от проникновения микроорганизмов и воды, но пропускает водяной пар и воздух. При поглощении экссудата из раны повязка образует гель, обеспечивая влажную среду, и предотвращает прилипание повязки к ране, поэтому ее можно снять безболезненно и без повреждения грануляций эпителиальной ткани. Повязка NEOFIX® FibroCold Ag обладает гибкостью, что позволяет использовать ее на любых частях тела. Полупрозрачность повязки позволяет контролировать состояние раны без смены повязки.

#### Техника наложения и частота смены повязки:

Промойте рану стерильным физиологическим раствором.  
Тщательно высушите рану и прилегающий участок кожи стерильным тампоном или салфеткой.

**A.** Извлеките повязку из упаковки.

**B.** Удалите защитный слой.

**C.** Наложите повязку NEOFIX® FibroCold Ag на рану гидроколлоидной клейкой стороной, заходя по 1,5 - 2 см на окружающую здоровую кожу.

Для дополнительной фиксации возможно наложение вторичной повязки. Заменяйте повязку, когда она теряет свои впитывающие свойства и появляется риск протекания. Частоту смены повязки назначает лечащий врач.

#### Меры предосторожности и противопоказания:

Лечение с помощью повязки NEOFIX® FibroCold Ag должно проходить строго под контролем врача. Не используйте повязку при наличии аллергии на серебро, индивидуальной непереносимости компонентов повязки, особенно при непереносимости карбоксиметилцеллюлозы, полиизобутена и его производных. При появлении раздражения, аллергической реакции или других нежелательных симптомов прекратите использование и обратитесь за консультацией к врачу. При первых нескольких применениях повязки площадь и глубина раны может увеличиваться, поскольку происходит очищение от нежизнеспособных тканей, но это должно сопровождаться улучшением внешнего вида раны. Если рана продолжает увеличиваться после первых нескольких применений повязки или не показывает признаки заживления, обратитесь к врачу.

Ввиду отсутствия клинических данных не рекомендуется применять во время беременности, кормления грудью и при лечении новорожденных.

Избегать контакта повязки NEOFIX® FibroCold Ag с электродами или токопроводящими гелями, используемых при ЭКГ и ЭЭГ.

Не оставлять повязку NEOFIX® FibroCold Ag на теле больного при магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Не рекомендуется применять с другими сопутствующими средствами местного лечения.

Только для одноразового применения.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.



**T.I.M.E.** ПОДРОБНО О ФАКТОРАХ  
ЭФФЕКТИВНОГО  
ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН  
[WWW.RANAM.NET](http://WWW.RANAM.NET)



РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
10 x 10	10	NF FCAG 1010

**Условия хранения:** в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е, Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.  
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: [www.atex-gr.com](http://www.atex-gr.com)