


IV PAD

NEOFIX®

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДИСТЫХ КАТЕТЕРОВ, ИГЛ, КАНЮЛЬ, ДРЕНАЖЕЙ И ДР.

- Паропроницаемый
- Адгезивный

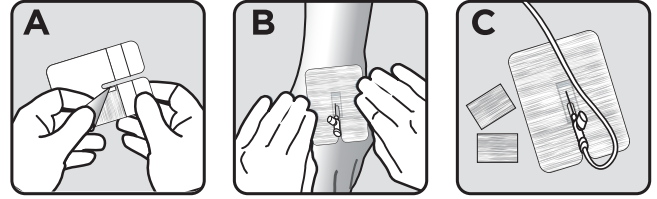

Описание: Стерильный пластырь - повязка на нетканой основе с U-образным разрезом в центре; с сорбционной функциональной подушечкой, продублированной травматической полимерной сеткой и двумя дополнительными впивающимися подушечками.

Показания: Для фиксации периферических сосудистых катетеров, игл, канюль, дренажей и др. для защиты места венепункции.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры предосторожности:

Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Для одноразового применения. Повторное использование повышает риск заражения или перекрестного загрязнения. Повязку не следует использовать при выделении из раны больших количеств экссудата, так как это может привести к мацерации окружающих тканей. Повязку не следует использовать для пациентов с известной чувствительностью к акриловому клею. Повязку можно накладывать на инфицированные раны только под наблюдением врача. Кожа перед наложением должна быть чистой и сухой, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Частота смены повязки: Ежедневно.

Рекомендации по наложению повязки NEOFIX IV PAD:

- Удалите защитные бумажные части
- Наложите и зафиксируйте повязку на коже
- В комплект входят две дополнительные впивающиеся подушечки

Состав: Нетканый материал полиэстер, клейкая основа – синтетический акрилатный клей, впивающаяся вискозная подушечка покрыта неприлипающей к ране полиэтиленовой сеткой.



РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
8 x 6	50	NF IVP 86

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е. Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО «Технопром», Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com