



# POST PU



## ПОВЯЗКА РАНЕВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ АДГЕЗИВНАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ С ВИСКОЗНОЙ ПОДУШЕЧКОЙ

ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН СО СЛАБОЙ ИЛИ УМЕРЕННОЙ ЭКССУДАЦИЕЙ,

ДЛЯ УХОДА ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЖИ

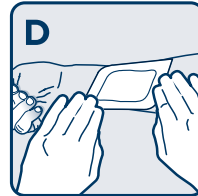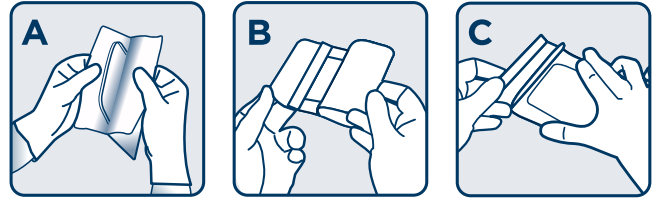

**Описание:** Адгезивная раневая повязка NEOFIX POST состоит из абсорбирующей прокладки с низкой адгезией и полимерной пленки. Повязка остается на месте даже в неудобных для фиксации повязки областях. Паропроницаемая. Атравматичная. Влагостойкая, позволяет принимать душ с наложенной повязкой. Непроницаема для бактерий, предотвращает инфицирование раны извне.

**Показания:** Для перевязки послеоперационных ран со слабой или умеренной экссудацией, а также для ухода за незначительными повреждениями кожи.

**Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

### Меры предосторожности при использовании:

Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Для одноразового применения. Повторно не стерилизовать. При вскрытой или поврежденной упаковке не использовать. Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Как и другие клеящиеся изделия, NEOFIX POST PU следует накладывать и снимать осторожно. Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

**Частота смены повязки:** На усмотрение лечащего врача. Может оставаться на ране до 7 дней.

### Инструкция по применению:

Вымойте руки до и после обработки раны.

Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.

**A.** Извлеките повязку из упаковки.

**B.** Удалите верхнюю часть подложки.

**C.** Удалите вторую часть подложки.

**D.** Расправьте повязку, убедившись, что повязка полностью покрывает рану.

Меняйте повязку по необходимости (например, если она намочила или загрязнена).

**Удаление:** снимайте осторожно, в особенности при слабой коже или при использовании у пожилых пациентов. Придерживайте кожу свободной рукой, осторожно снимая повязку по росту волос.

**Состав:** основа - полиуретан, вязкозная подушечка, полиэтиленовая сетка, синтетический акрилатный клей.



РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
6 x 8	50	NF PPU 68
15 x 8	50	NF PPU 158
20 x 10	50	NF PPU 2010
25 x 10	40	NF PPU 2510
30 x 10	40	NF PPU 3010
35 x 10	40	NF PPU 3510

**Условия хранения:** в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°С



Производитель: Фармапласт С. А. Е. Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.  
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО «Технопром», Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com