
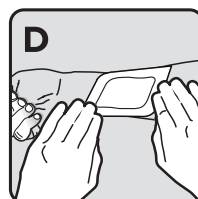


ПОВЯЗКА РАНЕВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ АДГЕЗИВНАЯ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВИСКОЗНОЙ ПОДУШЕЧКОЙ

ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН СО СЛАБОЙ ИЛИ УМЕРЕННОЙ ЭКССУДАЦИЕЙ,

ДЛЯ УХОДА ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЖИ

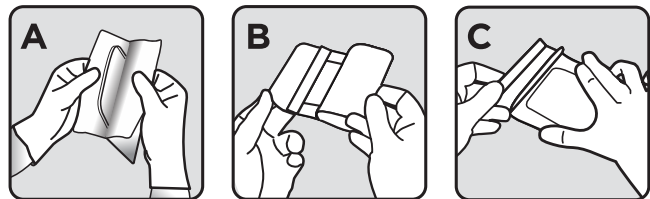

Описание: Адгезивная раневая повязка NEOFIX POST состоит из абсорбирующей прокладки с низкой адгезией и мягкой клейкой каймы. Повязка остается на месте даже в неудобных для фиксации повязки областях. Паропроницаемая. Атравматичная.

Показания: Для перевязки послеоперационных ран со слабой или умеренной экссудацией, а также для ухода за незначительными повреждениями кожи.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры предосторожности при использовании:

Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Для одноразового применения. Повторно не стерилизовать. При вскрытой или поврежденной упаковке не использовать. Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Как и другие клеящиеся изделия, NEOFIX POST следует накладывать и снимать осторожно. Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

Частота смены повязки: На усмотрение лечащего врача, но не реже чем 1 раз в три дня.

Инструкция по применению:

- Вывойте руки до и после обработки раны.
 - Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
 - A.** Извлеките повязку из упаковки.
 - B.** Удалите верхнюю часть подложки.
 - C.** Удалите вторую часть подложки.
 - D.** Расправьте повязку, убедившись, что повязка полностью покрывает рану.
- Меняйте повязку по необходимости (например, если она намокла или загрязнена).

Удаление: снимайте осторожно, в особенности при слабой коже или при использовании у пожилых пациентов. Придерживайте кожу свободной рукой, осторожно снимая повязку по росту волос.

Состав: основа - полиуретан, вискозная подушечка, полиэтиленовая сетка, синтетический акрилатный клей.



РАЗМЕР СМ X СМ	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
6 x 8	50	NF PPU 68
15 x 8	50	NF PPU 158
20 x 10	50	NF PPU 2010
25 x 10	40	NF PPU 2510
30 x 10	40	NF PPU 3010
35 x 10	40	NF PPU 3510

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°С



Производитель: Фармапласт С. А. Е, Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
 Импортёр/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com