


Roll

NEOFIX®

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ

- Рулонный
- Нестерильный
- Паропроницаемый
- Адгезивный

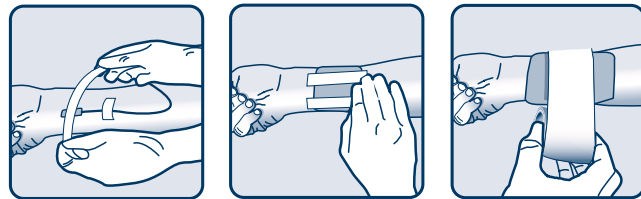

Показания:

Пластырь медицинский на нетканной основе NEOFIX Roll предназначен для фиксации повязок и медицинских устройств.

Свойства:

- Защитное бумажное покрытие с разметкой обеспечивает удобство нанесения, предотвращает склеивание повязки и высыхание адгезивного слоя в процессе хранения.
- Гипоаллергенный клей не травмирует кожу и не оставляет следов.
- Перфорированная структура основы характеризуется высокой воздухо- и паропроницаемостью, обеспечивает эффективный влагообмен, позволяя коже «дышать», не вызывая мацерации.
- Удаляется легко и безболезненно, не травмируя кожный покров и не оставляя следов адгезивного слоя на коже.

Способ применения:

Перед наложением пластыря убедитесь, что кожа сухая и чистая.

Отрежьте кусок пластыря нужной длины.

А. Удалите часть нижнего защитного покрытия, чтобы обнажить клейкую поверхность пластыря.

В. Наложите пластырь, одновременно удаляя оставшуюся часть защитного покрытия. Избегайте излишнего растягивания пленки во время наложения.

С. Удалите обе части бумажного защитного покрытия с верхней части пластыря. Разгладьте пленку кончиками пальцев для обеспечения хорошей адгезии.

Фиксирование повязки полосками пластыря.

Для того чтобы зафиксировать повязку полосками пластыря отрежьте от рулона необходимое количество полосок нужной длины. Сгибая по длине отрезки, удалите защитное бумажное покрытие с одной половины пластыря, затем с другой и зафиксируйте ранее наложенную повязку несколькими полосками.


Сплошная фиксация.

Для выбора размера пластыря NEOFIX Roll для сплошной фиксации важно, чтобы ширина и длина отрезка пластыря превышала размеры наложенной повязки. Определиться с размером, отрежьте нужную длину, согните отрезок и поочередно удалите защитные слои с пластыря. Такой метод фиксации повязок, надежно защитит рану от попадания загрязнений и микроорганизмов.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергических реакций прекратите использование пластыря и обратитесь за консультацией к врачу. Для одноразового применения.

Состав: Основа – нетканый материал полипропилен, клейкая основа – синтетический акрилатный клей

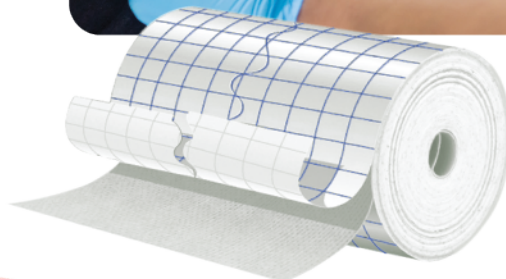

РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул	
6 x 1000	1	NF R 061	в рулоне
10 x 1000	1	NF R 101	в рулоне
15 x 1000	1	NF R 151	в рулоне
20 x 1000	1	NF R 201	в рулоне

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е. Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО «Технопром», Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com