

FibroSorb Ag

NEOFIX®

ПОВЯЗКА РАНЕВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ С ИОНАМИ СЕРЕБРА




ГУБЧАТАЯ
АТРАВМАТИЧНАЯ






БОРЬБА С ИНФЕКЦИЕЙ
БАЛАНС ВЛАЖНОСТИ
ЗАЖИВЛЕНИЕ



СТЕПЕНЬ
ЭКССУДАЦИИ

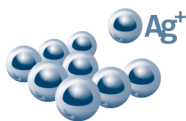

АНТИМИКРОБНАЯ

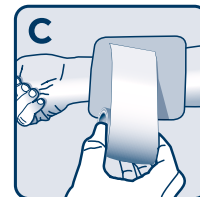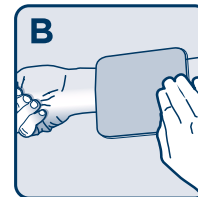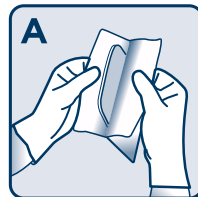

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09610 от 04.09.2020

Описание: NEOFIX® FibroSorb Ag - паропроницаемая абсорбирующая бактерицидная повязка, состоящая из подушечки из вспененного полиуретана с ионами серебра с атравматичным раноконтактным покрытием. Для фиксации на ране требуется вторичная повязка.

Для наружного применения.
Стерильность гарантирована при целостности упаковки.
Только для одноразового применения.

Состав: полиуретановая губка, полиуретановая пленка, ионы серебра.

Показания: Повязка NEOFIX® FibroSorb Ag предназначена для сильно и умеренно экссудующих ран, в том числе инфицированных ран и ран с риском развития вторичной инфекции, таких как пролежни, венозные трофические язвы, диабетические язвы стопы, ожоги первой и второй степени, донорские участки при пересадке кожи, хирургические раны.

Свойства: Полиуретановая пенная подушечка в повязке NEOFIX® FibroSorb Ag обеспечивает оптимальные условия для заживления ран во влажной среде, оптимальный дренаж экссудата и его удержание, предотвращает риск развития мацерации раны и окружающих кожных покровов, создает эффект амортизации, что обеспечивает дополнительную защиту раны от внешнего механического воздействия. Благодаря наличию ионов серебра по всей толщине полиуретановой абсорбирующей подушечки повязка NEOFIX® FibroSorb Ag оказывает антимикробное действие, подавляет патогенные микроорганизмы, предотвращая развитие раневой инфекции. Серебро обладает широким спектром антимикробного действия на грамотрицательные, грамположительные бактерии, вирусы и грибы. Наружная дышащая полиуретановая пленка защищает рану от проникновения микроорганизмов и позволяет поглощенному экссудату испаряться, что увеличивает емкость пенной подушечки.

Техника наложения и частота смены повязки:

Промойте рану стерильным физиологическим раствором.
Тщательно высушите рану и прилегающий участок кожи стерильным тампоном или салфеткой.

A. Извлеките повязку из упаковки.

B. Наложите повязку NEOFIX® FibroSorb Ag прямо на рану абсорбирующей (матовой) стороной, заходя по 2 см на окружающую здоровую кожу.

C. Зафиксируйте вторичной повязкой.

Частоту смены повязки назначает лечащий врач. Рекомендуемая смена повязки не реже 1 раза в 3 дня.

Меры предосторожности и противопоказания:

Лечение с помощью повязки NEOFIX® FibroSorb Ag должно проходить строго под контролем врача. Не используйте повязку при наличии аллергии на серебро, индивидуальной непереносимости компонентов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование и обратитесь за консультацией к врачу.

Ввиду отсутствия клинических данных не рекомендуется применять во время беременности, кормления грудью и при лечении новорожденных.

Избегать контакта повязки NEOFIX® FibroSorb Ag с электродами или токопроводящими гелями, используемых при ЭКГ и ЭЭГ.

Не оставлять повязку NEOFIX® FibroSorb Ag на теле больного при магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Не рекомендуется применять с другими сопутствующими средствами местного лечения.

Не следует применять повязку на сухие или некротизированные раны, при кровотечении в ране, ожогах 3 степени.

Не применять на ранах, проникающих до мышц и костей.

Не использовать в контакте с окислителями, например, с перекисью водорода, так как это может привести к разрушению абсорбирующего гидроцеллюлярного компонента повязки.

Не используйте по истечении срока годности.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.



РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
10 x 10	10	NF FSAG 1010

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е, Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com